

Compresse chaud / froid

La compresse chaud / froid peut être utilisée froide pour aider à réduire l'inflammation à la suite d'une blessure par exemple, ou chaude pour apporter un soulagement réconfortant.

Points clés :

- Réutilisable
- Soulage la douleur
- Désensibilise temporairement la zone touchée
- Réduit les gonflements
- Contracte les vaisseaux sanguins pour minimiser le saignement interne
- Restreint l'inflammation et la possibilité d'une seconde blessure
- Récupération en cas de fatigue.
- Idéale également pour les rages de dents, maux de tête et fièvre.

Comment l'utiliser

En version froid :

La compresse doit être placée 1h au congélateur avant utilisation. Vous pouvez stocker la compresse dans le congélateur pour que celle-ci soit prête à l'emploi immédiatement.

En version chaud :

Au micro-ondes : Vous pouvez mettre votre compresse au micro-ondes durant environ 30s à 600W. Si la compresse n'est pas assez chaude répéter l'opération sur un temps de 15s.

Dans une casserole : Faites bouillir de l'eau dans une casserole. Une fois que l'eau bout, retirez la casserole du feu et plongez la compresse pendant 4 à 10 minutes. Après les 4 premières minutes d'immersion, vérifiez chaque minute si la température voulue a été atteinte.

Qualité

La compresse est fabriquée avec des matériaux de grade médical certifié et fait l'objet d'une de la certification ISO 13485. Le produit a été approuvé par la FDA américaine.

Dimensions et composition

Dimensions : 26x13cm

Composition extérieure : PVC hypoallergénique

Composition intérieure : Glycérine / Carboxyméthylcellulose sodium / Propanediol / Désinfectant / eau. Non toxique

Si votre compresse est percée ne pas la réutiliser. En cas de contact direct avec le gel contenu dans la compresse, rincez-vous à l'eau froide.

Responsabilité

Neo Factory - Climsom ne saurait être tenu responsable de toute conséquence direct ou indirecte liée à l'utilisation des compresses. En cas de doute sur l'utilisation des produits relativement à votre situation médicale personnelle, parlez-en à votre médecin.

Garantie

Ce produit n'est ni un jouet ni un dispositif médical. Neo Factory - Climsom ne peut en aucun cas garantir les conséquences de l'utilisation des compresses sur la santé. Neo Factory - Climsom garantit l'acheteur d'origine du produit de tout défaut de fabrication du produit pendant 1 an à compter de la date d'achat.

La garantie ne couvre pas la décoloration ou les effets de produits cosmétiques ou solaires sur les compresses. La mise en œuvre de la garantie entrainera le seul remplacement du produit défectueux à l'exclusion de toute autre réparation.

Climsom, c'est une équipe de passionnés qui créent, dénichent et référencent le meilleur des produits innovants et inédits pour prendre soin de vous autrement.



Découvrez tout l'univers bien-être et beauté Climsom à travers nos différentes gammes de produits.

Taie en soie, accessoires d'acupression, couette en duvet de canard, caleçon rafraichissant.

www.climsom.com

Neo Factory / Climsom – 6 Allée du commandant Charcot – 44000 Nantes

Tel : 02 85 52 44 74 - contact@climsom.com