

Bandeau rafraîchissant

Le refroidissement est utilisé pour récupérer de la fatigue et soulager les inflammations.

Points clés :

- Soulage la douleur
- Désensibilise temporairement la zone touchée
- Récupération en cas de fatigue.
- Idéale également pour les maux de tête et fièvre.

Avantages :

- Doux et confortable
- Hypoallergénique
- Facile d'entretien
- Ajustable à tous les tours de tête
- Réutilisable

Comment l'utiliser

En version froid :

Le bandeau rafraîchissant doit être stocké dans un endroit frais et peut être utilisé immédiatement. Pour un rafraîchissement supplémentaire vous pouvez placer votre bandeau dans un réfrigérateur ou au congélateur pendant 1 heure.

Utilisez ensuite votre bandeau rafraîchissant pendant 20-30 minutes et répétez l'opération si besoin.

En version chaud :

Au micro-ondes : Parce que les micro-ondes varient en puissance, vérifiez le temps de chauffage avec soin.

Aplatir le bandeau uniformément puis mettez-le dans le micro-ondes à pleine puissance pendant 30 secondes environ. Laissez ensuite reposer pendant 1 minute. Si le bandeau n'est pas assez chaud remettez le à chauffer par intervalle de 10 secondes.

Dans une casserole : Immergez le bandeau dans l'eau très chaude (non bouillante) pendant 10 minutes. Essuyez ensuite avec une serviette, puis testez la température du bandeau. Si celui-ci est trop chaud, laissez-le refroidir quelques minutes.

Qualité

La compresse est fabriquée avec des matériaux de grade médical certifié et fait l'objet d'une de la certification ISO 13485. Le produit a été approuvé par la FDA américaine.

Dimensions et composition

Dimensions : 26x13cm

Composition extérieure : PVC hypoallergénique

Composition intérieure : Glycérine / Carboxyméthylcellulose sodium / Propanediol / Désinfectant / eau. Non toxique

Si votre compresse est percée ne pas la réutiliser. En cas de contact direct avec le gel contenu dans la compresse, rincez-vous à l'eau froide.

Responsabilité

Neo Factory - Climsom ne saurait être tenu responsable de toute conséquence direct ou indirecte liée à l'utilisation du bandeau rafraîchissant. En cas de doute sur l'utilisation des produits relativement à votre situation médicale personnelle, parlez-en à votre médecin.

Garantie

Ce produit n'est ni un jouet ni un dispositif médical. Neo Factory - Climsom ne peut en aucun cas garantir les conséquences de l'utilisation du bandeau rafraîchissant sur la santé. Neo Factory - Climsom garantit l'acheteur d'origine du produit de tout défaut de fabrication du produit pendant 1 an à compter de la date d'achat.

La garantie ne couvre pas la décoloration ou les effets de produits cosmétiques ou solaires sur le bandeau rafraîchissant. La mise en œuvre de la garantie entrainera le seul remplacement du produit défectueux à l'exclusion de toute autre réparation.

Climsom, c'est une équipe de passionnés qui créent, dénichent et référencent le meilleur des produits innovants et inédits pour prendre soin de vous autrement.



Découvrez tout l'univers bien-être et beauté Climsom à travers nos différentes gammes de produits.

Taie en soie, accessoires d'acupression, couette en duvet de canard, caleçon rafraichissant.

www.climsom.com

Neo Factory / Climsom – 6 Allée du commandant Charcot – 44000 Nantes

Tel : 02 85 52 44 74 - contact@climsom.com