

Compresse chaude instantanée

Une simple pression de cette compresse à usage unique vous permettra d'avoir une chaleur rapide et efficace.

Points clés :

- ❖ Compresse à usage unique
- ❖ Soulagement des symptômes suivants :
 - Articulations douloureuses et raides
 - Maux et douleurs musculaires
 - Tensions musculaires et crampes
- ❖ Atteint jusqu'à 43°C
- ❖ Reste efficace pendant environ 30 minutes

Comment l'utiliser



Saisir les bords extérieurs de la compresse dans votre main

Malaxer la compresse après activation pour uniformiser son contenu

Appliquer sur la zone voulue pendant environ 30 minutes

Jeter la compresse dans la poubelle après utilisation

Qualité

Certification CE

Dimensions et composition

Dimensions : 23x15cm

Composition intérieure : Sodium (non toxique), dextrose, eau

Précautions d'utilisation

Compresse à utilisation unique.

Utilisation externe seulement.

Si votre compresse est percée ne pas la réutiliser. En cas de contact direct avec le contenu de la compresse, rincez-vous immédiatement à l'eau froide et consultez votre médecin. En cas d'ingestion du contenu de la compresse, consultez immédiatement votre médecin ou le centre anti-poison le plus proche.

Ne pas percer et ne pas faire exploser le pack d'une quelconque manière

Conserver à température ambiante (en dessous de 40°C)

Responsabilité

Neo Factory - Climsom ne saurait être tenu responsable de toute conséquence direct ou indirecte liée à l'utilisation des compresses. En cas de doute sur l'utilisation des produits relativement à votre situation médicale personnelle, parlez-en à votre médecin.

Climsom, c'est une équipe de passionnés qui créent, dénichent et référencent le meilleur des produits innovants et inédits pour prendre soin de vous autrement.



Découvrez tout l'univers bien-être et beauté Climsom à travers nos différentes gammes de produits.

Taie en soie, accessoires d'acupression, couette en duvet de canard, caleçon rafraichissant.

www.climsom.com

Neo Factory / Climsom – 6 Allée du commandant Charcot – 44000 Nantes

Tel : 02 85 52 44 74 - contact@climsom.com